


# Chirurgische Phase




## Implantat

### Einsetzen

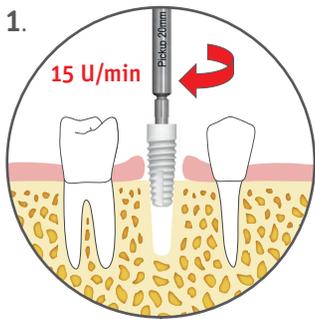


**1. Eindrehen**  
Implantat langsam in den vorgeschrittenen Bohrstollen eindrehen.

**Wichtig!**  
Rescue Pickup niemals zum Inserieren verwenden.

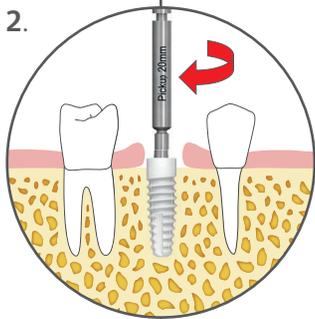


**2. Festziehen**  
Implantat mit der Ratsche festziehen.  
Empfehlung: 20 - 30 Ncm  
**SB max. 35 Ncm**  
**RB/WB max. 45 Ncm**

**Wichtig!**  
Das Drehmoment wird aufgrund des konischen Designs erst bei den letzten zwei Umdrehungen aufgebaut.

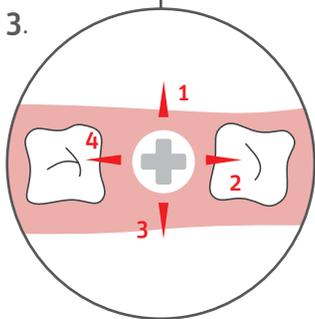


**3. Positionierung**  
◀ = Die Pfeile zeigen die möglichen Positionen des abgewinkelten Abutments an. Berücksichtigen Sie diese beim Einbringen des Implantates.


### Verschliessen

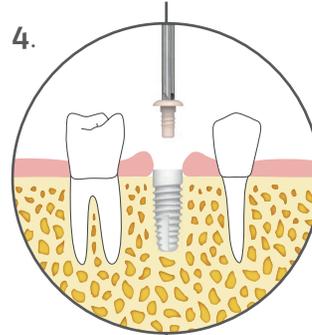

**4. Verschliessen**  
Implantat mit Healing Cap verschliessen. Dazu Prothetikschlüssel (XT38619/XT38623/XT38628) verwenden und das Healing Cap vorsichtig festschrauben (**max. 5 Ncm**).

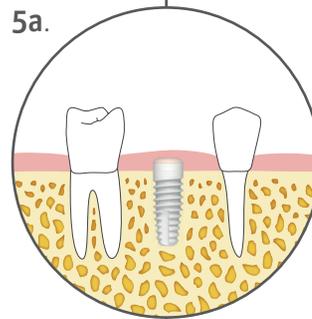

**5a. Variante 1**  
Geschlossene Einheilung (empfohlen).

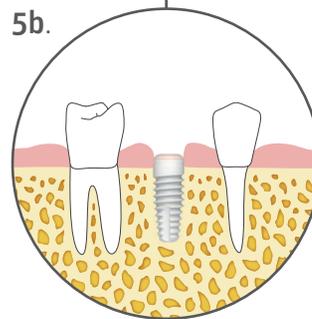

**5b. Variante 2**  
Offene Einheilung, auf dicht anliegende Gingiva achten.

### Protokollarisches Drehmoment einhalten!

Das maximale Drehmoment beträgt bei allen SB Implantaten **35 Ncm**. Bei allen RB und WB Implantaten beträgt das maximale Drehmoment **45 Ncm**. Dies darf niemals überschritten werden. Der Pickup verfügt über eine Sollbruchstelle bei ca. 50 Ncm. Maximale Drehzahl: **15 U/min**.